


Integração do Carestream com o PACS do App de Telerradiologia da UniRadio.

Passo 1

Acesse a aba de “Configuração PACS” do App de Telerradiologia da UniRadio.

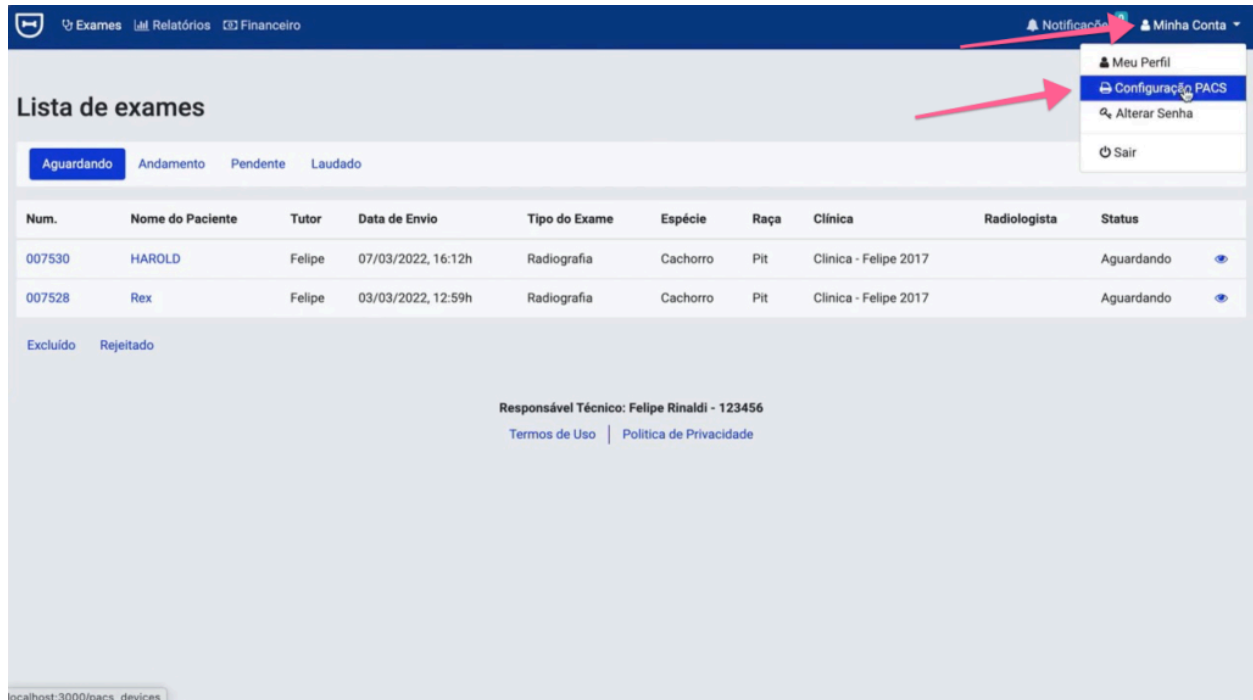


The screenshot displays the UniRadio Telerradiologia app interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Exames', 'Relatórios', and 'Financeiro'. On the right side of the navigation bar, there are icons for 'Notificações' and 'Minha Conta'. A dropdown menu is open from the 'Minha Conta' icon, showing options: 'Meu Perfil', 'Configuração PACS' (highlighted in blue), 'Alterar Senha', and 'Sair'. A red arrow points to the 'Configuração PACS' option. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Lista de exames'. There are tabs for 'Aguardando', 'Andamento', 'Pendente', and 'Laudado'. The 'Aguardando' tab is selected. Below the tabs is a table with the following columns: 'Num.', 'Nome do Paciente', 'Tutor', 'Data de Envio', 'Tipo do Exame', 'Espécie', 'Raça', 'Clínica', 'Radiologista', and 'Status'. The table contains two rows of data:

Num.	Nome do Paciente	Tutor	Data de Envio	Tipo do Exame	Espécie	Raça	Clínica	Radiologista	Status
007530	HAROLD	Felipe	07/03/2022, 16:12h	Radiografia	Cachorro	Pit	Clinica - Felipe 2017		Aguardando
007528	Rex	Felipe	03/03/2022, 12:59h	Radiografia	Cachorro	Pit	Clinica - Felipe 2017		Aguardando

Below the table, there are tabs for 'Excluído' and 'Rejeitado'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Responsável Técnico: Felipe Rinaldi - 123456' and links for 'Termos de Uso' and 'Política de Privacidade'. The browser address bar at the bottom left shows 'localhost:3000/pacs_devices'.

Tome nota dos dados informados na página de “Configuração PACS”, pois será necessário adicioná-los nas configurações do seu CareStream.

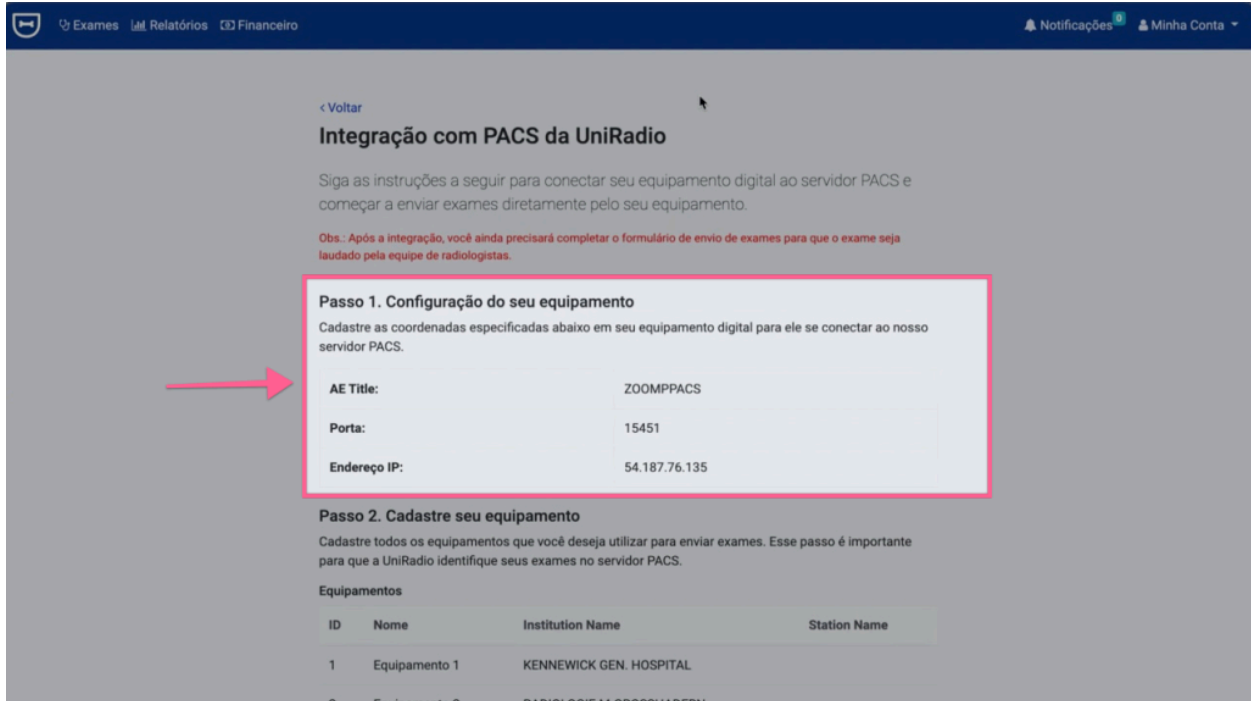

< Voltar

Integração com PACS da UniRadio

Siga as instruções a seguir para conectar seu equipamento digital ao servidor PACS e começar a enviar exames diretamente pelo seu equipamento.

Obs.: Após a integração, você ainda precisará completar o formulário de envio de exames para que o exame seja laudado pela equipe de radiologistas.

Passo 1. Configuração do seu equipamento

Cadastre as coordenadas especificadas abaixo em seu equipamento digital para ele se conectar ao nosso servidor PACS.

AE Title:	ZOOMPPACS
Porta:	15451
Endereço IP:	54.187.76.135

Passo 2. Cadastre seu equipamento


Cadastre todos os equipamentos que você deseja utilizar para enviar exames. Esse passo é importante para que a UniRadio identifique seus exames no servidor PACS.

Equipamentos

ID	Nome	Institution Name	Station Name
1	Equipamento 1	KENNEWICK GEN. HOSPITAL	
2	Equipamento 2	RADIOLOGIE MCGROSSHAFERN	

Passo 2

Na mesma página, clique em “Adicionar Equipamento”.

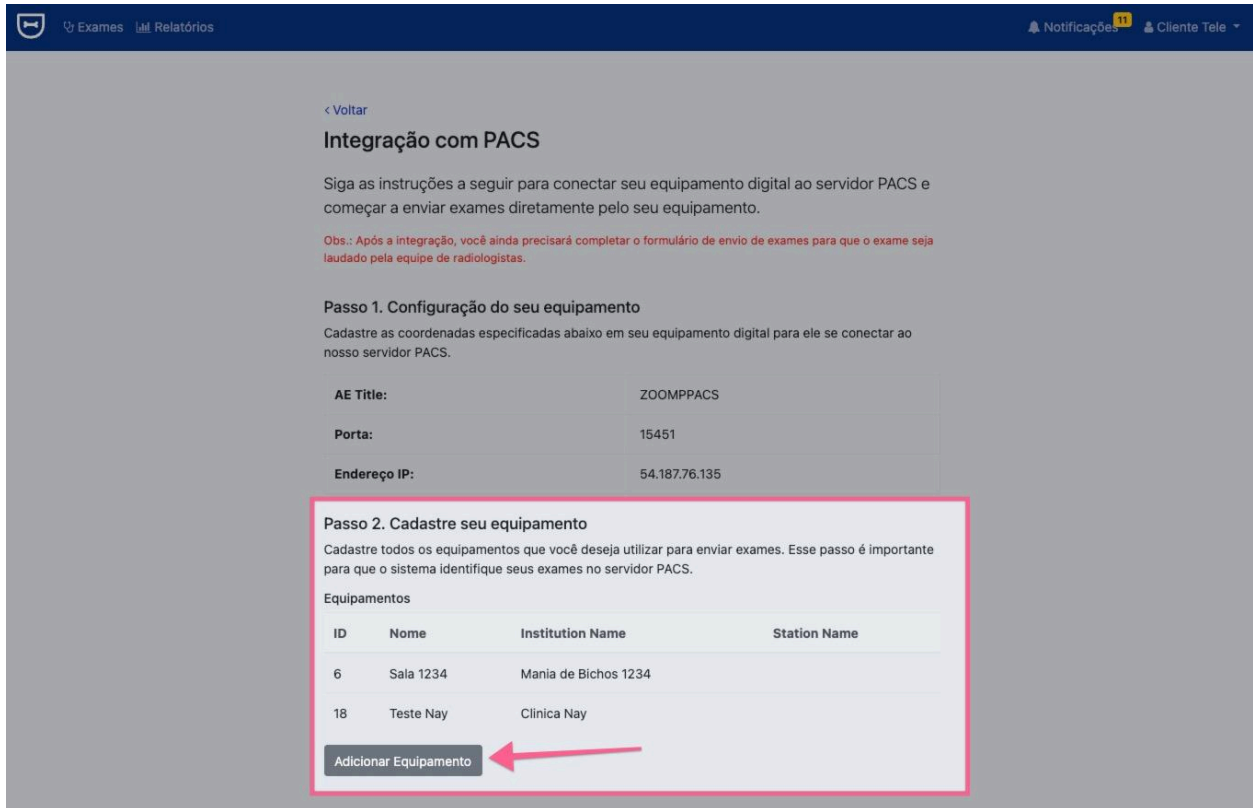

< Voltar

Integração com PACS

Siga as instruções a seguir para conectar seu equipamento digital ao servidor PACS e começar a enviar exames diretamente pelo seu equipamento.

Obs: Após a integração, você ainda precisará completar o formulário de envio de exames para que o exame seja laudado pela equipe de radiologistas.

Passo 1. Configuração do seu equipamento

Cadastre as coordenadas especificadas abaixo em seu equipamento digital para ele se conectar ao nosso servidor PACS.

AE Title:	ZOOMPPACS
Porta:	15451
Endereço IP:	54.187.76.135

Passo 2. Cadastre seu equipamento


Cadastre todos os equipamentos que você deseja utilizar para enviar exames. Esse passo é importante para que o sistema identifique seus exames no servidor PACS.

Equipamentos

ID	Nome	Institution Name	Station Name
6	Sala 1234	Mania de Bichos 1234	
18	Teste Nay	Clinica Nay	

Adicionar Equipamento

Em seguida, preencha os campos “Nome do Equipamento” e “Nome Da Instituição” cadastrado no seu software Carestream Image Suite, e clique em “Cadastrar Equipamento”.

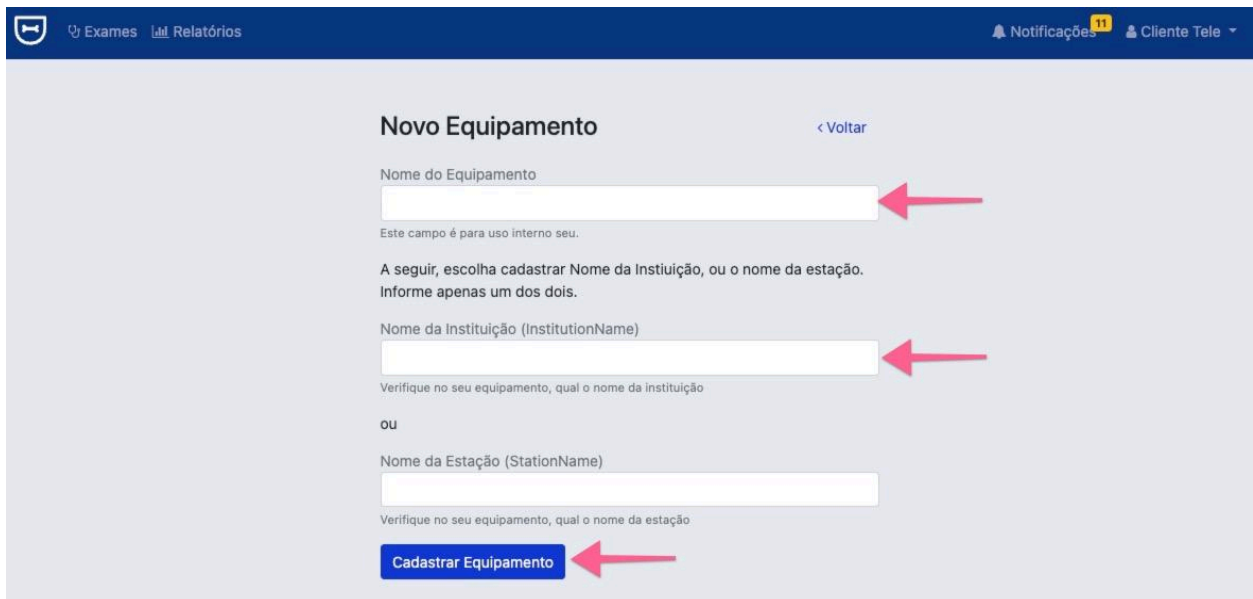

< Voltar

Novo Equipamento

Nome do Equipamento

Este campo é para uso interno seu.

A seguir, escolha cadastrar Nome da Instituição, ou o nome da estação. Informe apenas um dos dois.

Nome da Instituição (InstitutionName)

Verifique no seu equipamento, qual o nome da instituição


ou


Nome da Estação (StationName)

Verifique no seu equipamento, qual o nome da estação

Cadastrar Equipamento


Passo 3

Abra o aplicativo Carestream “Image Suite - Serviço de Configuração” (ou Service Configuration), e em seguida selecione o item “Outro Registro Pacs”. Depois, clique no ícone de “Novo Registro”()

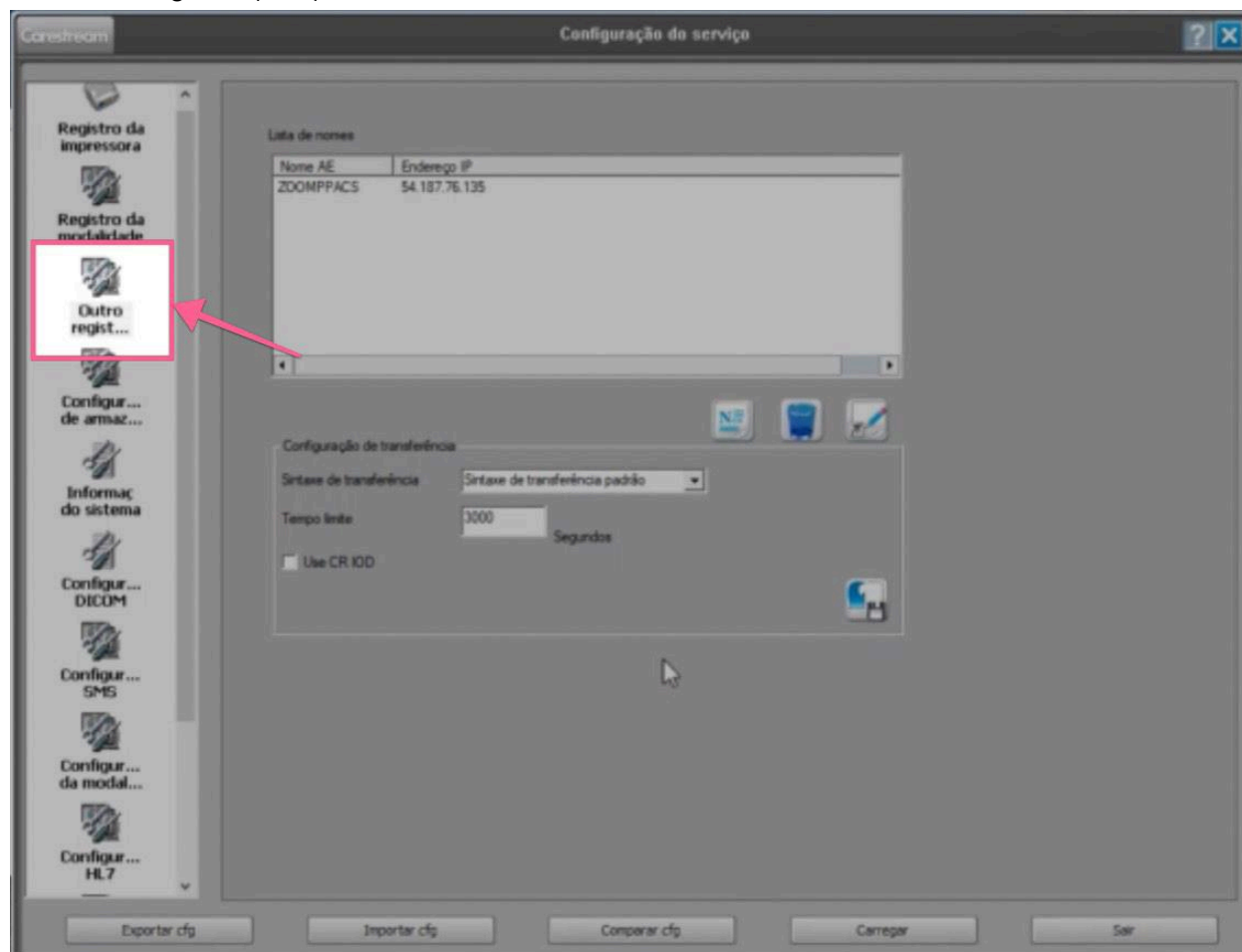


Passo 4

Informe os dados do “Passo 1”, nos campos respectivos, dentro das configurações do Carestream, como exemplificado abaixo:

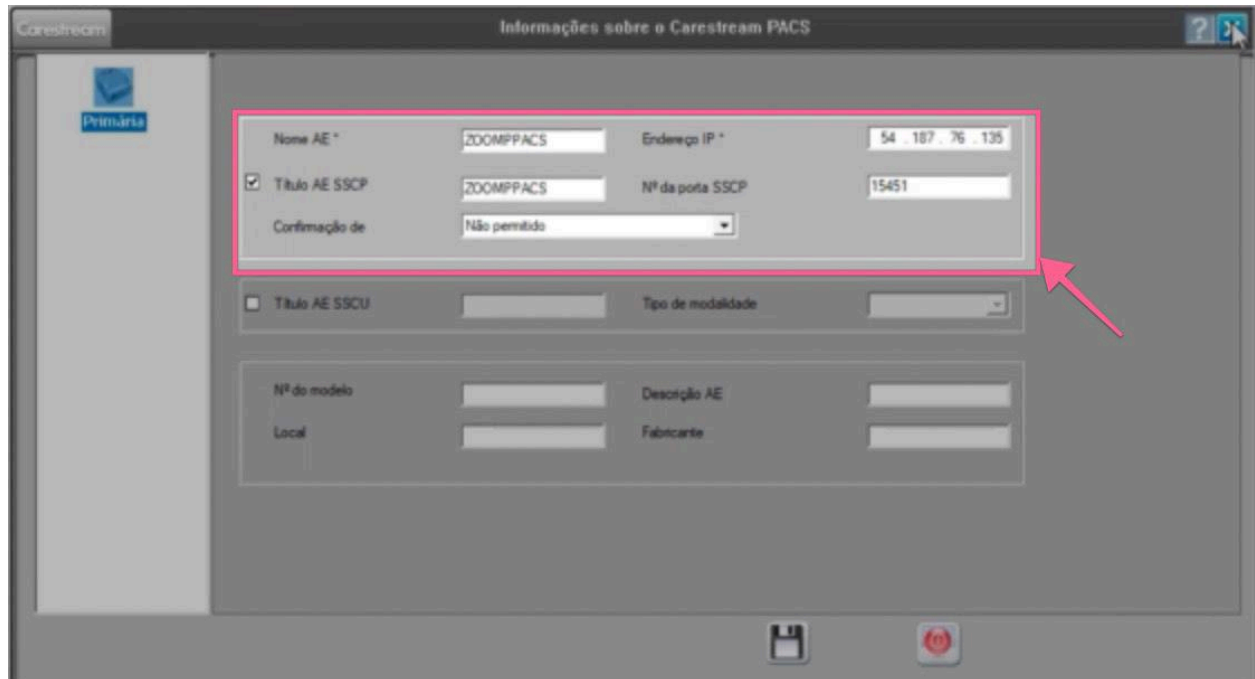


Depois clique em “Salvar”.

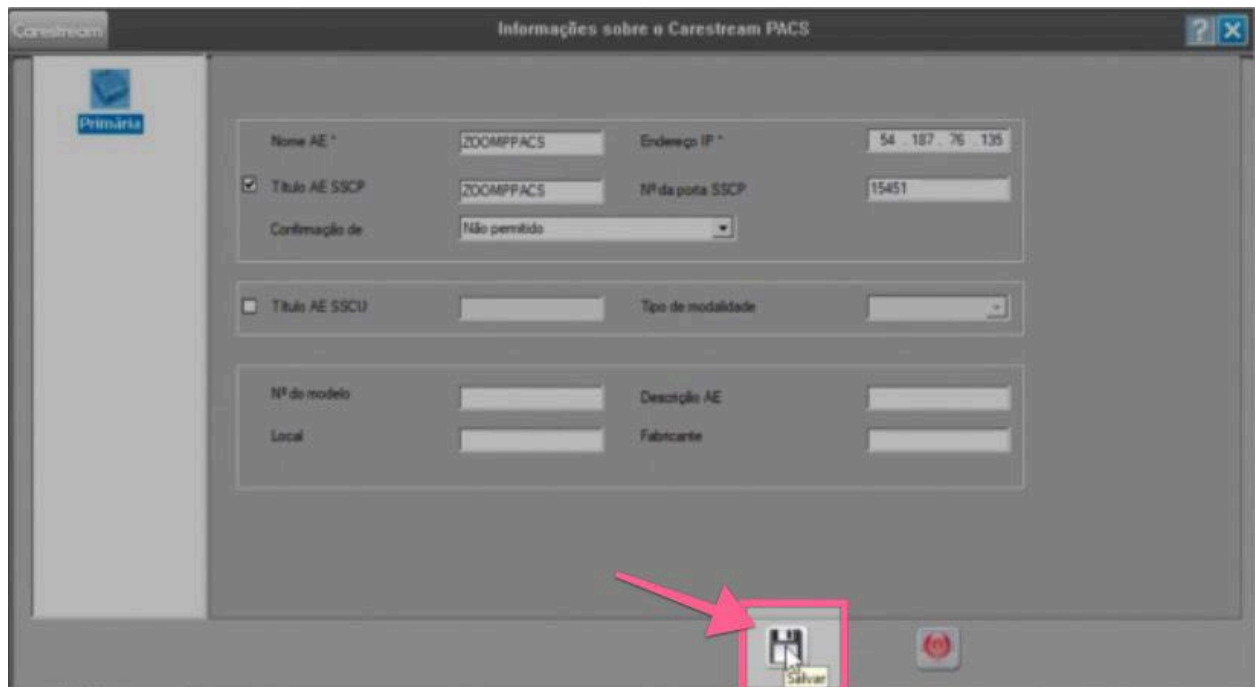


Passo 5 (Opcional)

Aumente o tempo limite da transferência para um número que se adapte a sua situação. Comece com “600” segundos, mas se as transferências forem interrompidas, aumente aos poucos, para dar tempo suficiente para completar as transferências de exames.

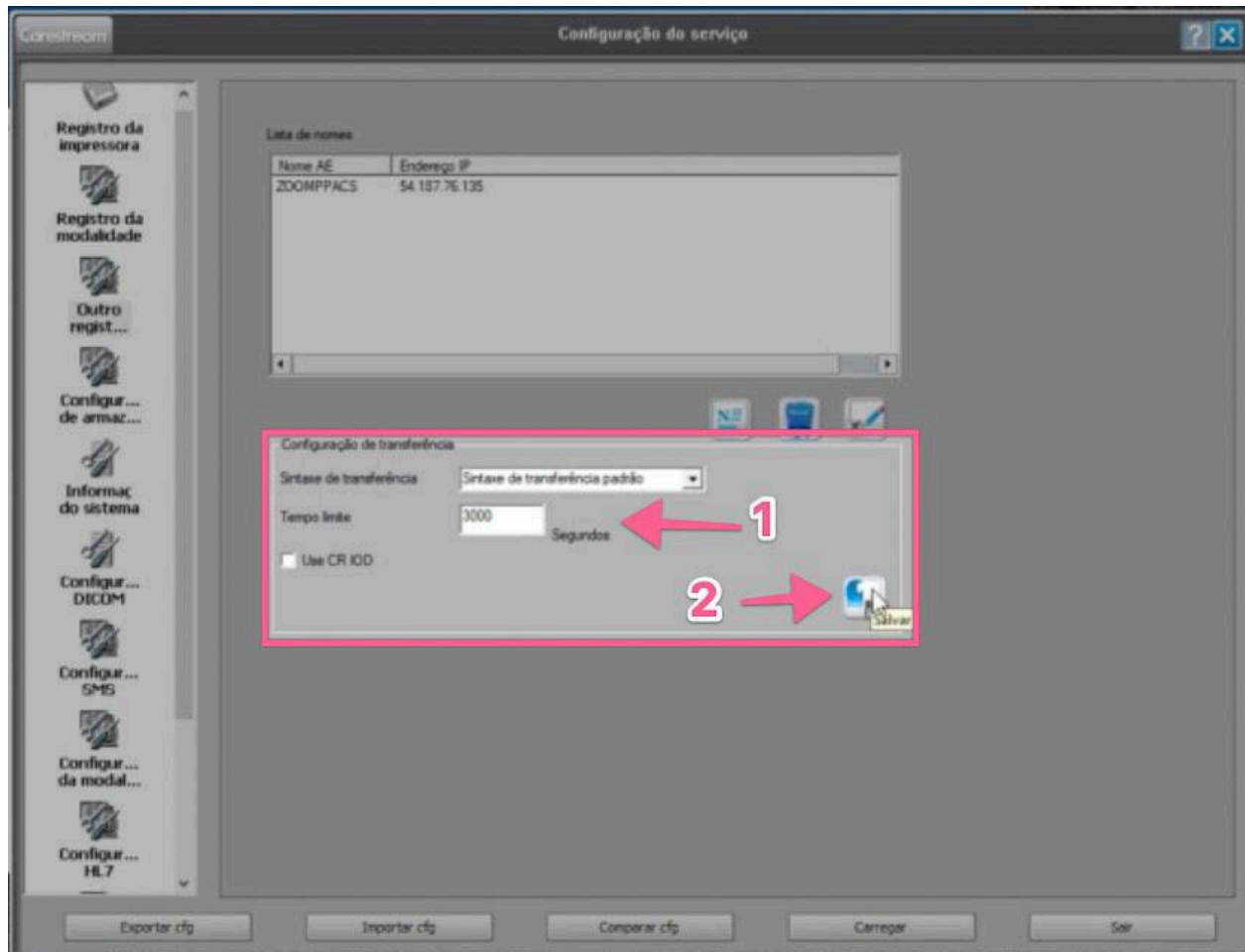


Passo 6


Depois clique em “Carregar” ou “Salvar”.

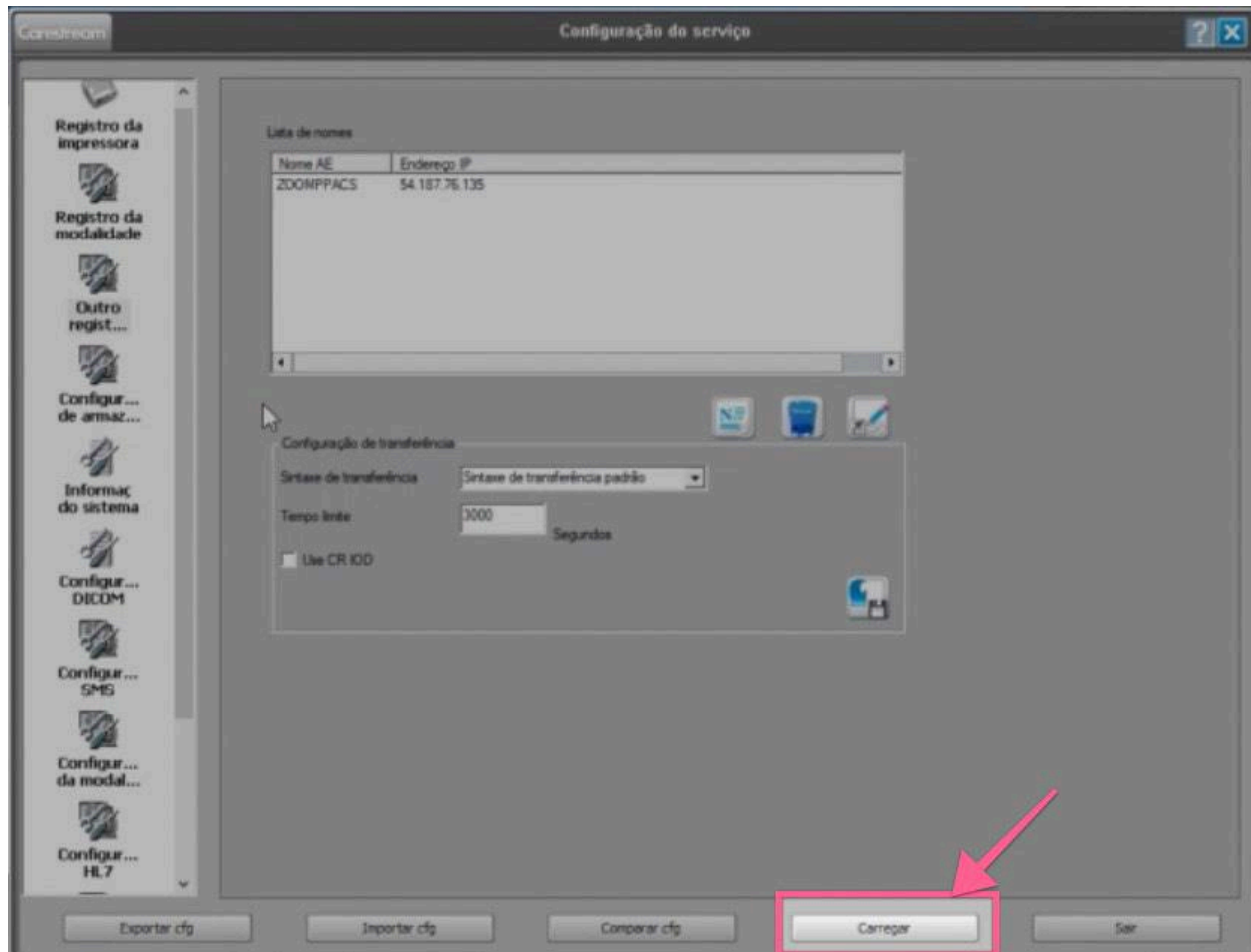


Passo 8

Clique no botão de transferências:

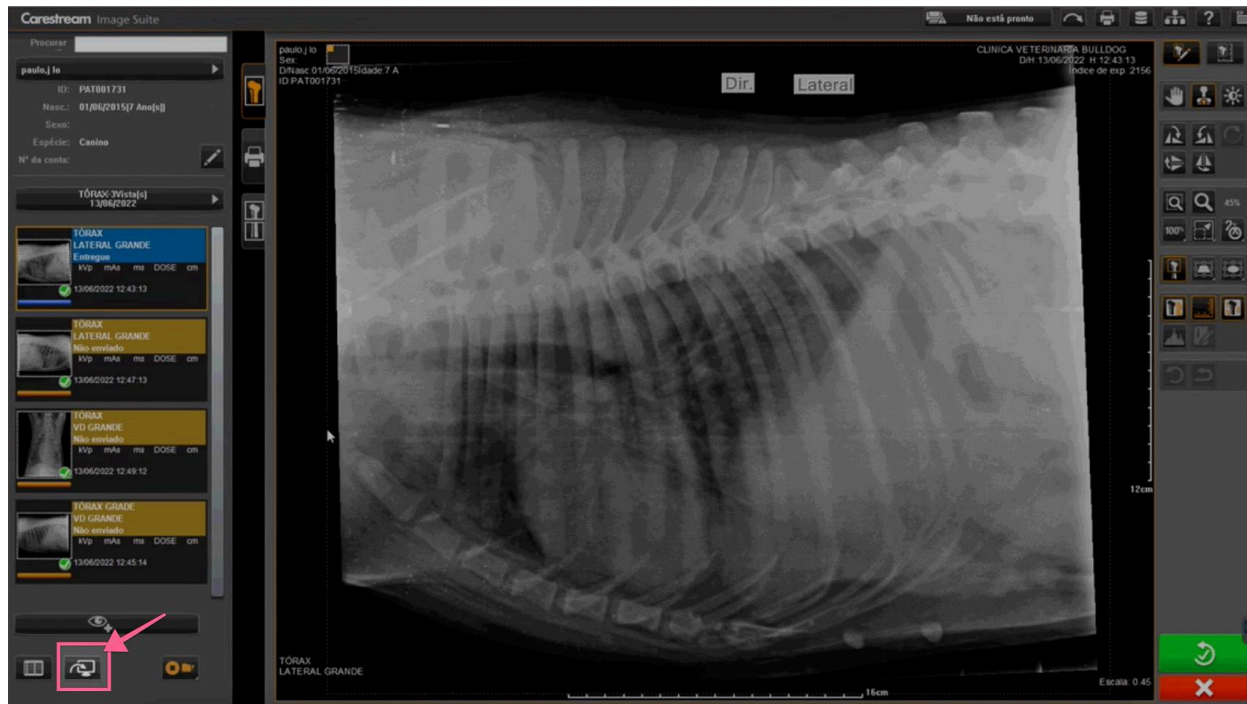


Escolha as imagens que devem ser enviadas junto com o exame. Em seguida, selecione o servidor da lista de servidores e clique em “Enviar” ().

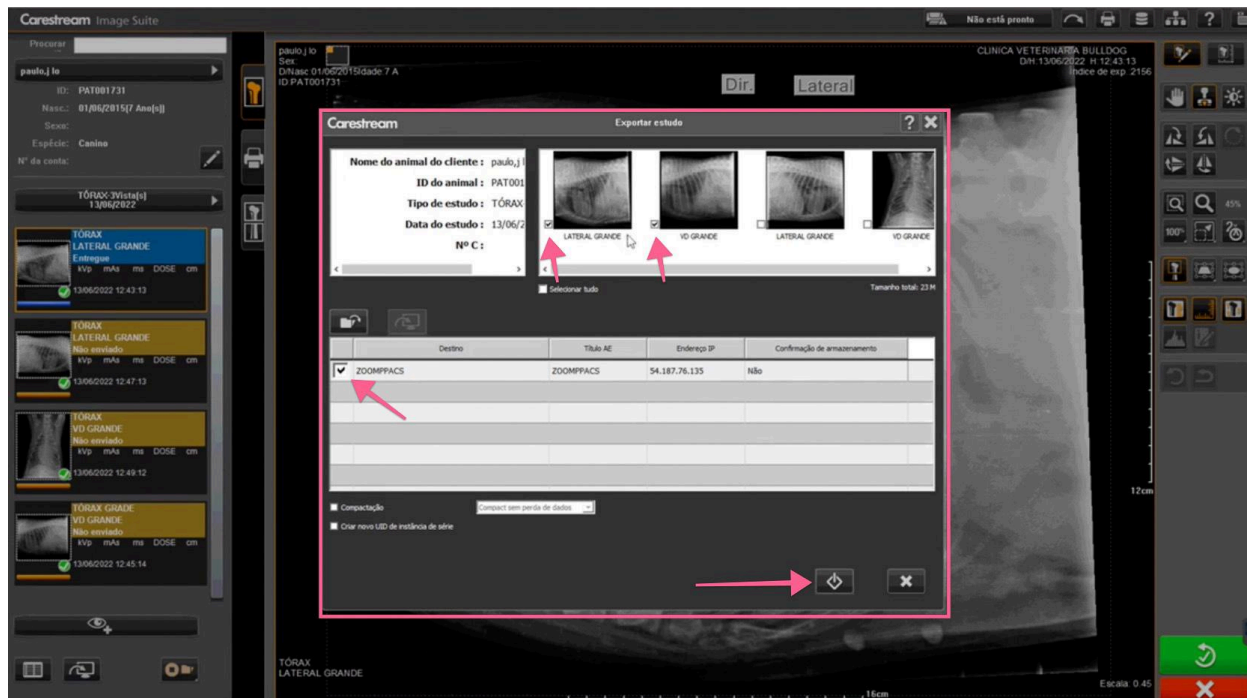

Passo 9

Para verificar o status do envio, basta clicar no ícone de transferências no canto superior direito, como exemplificado abaixo:

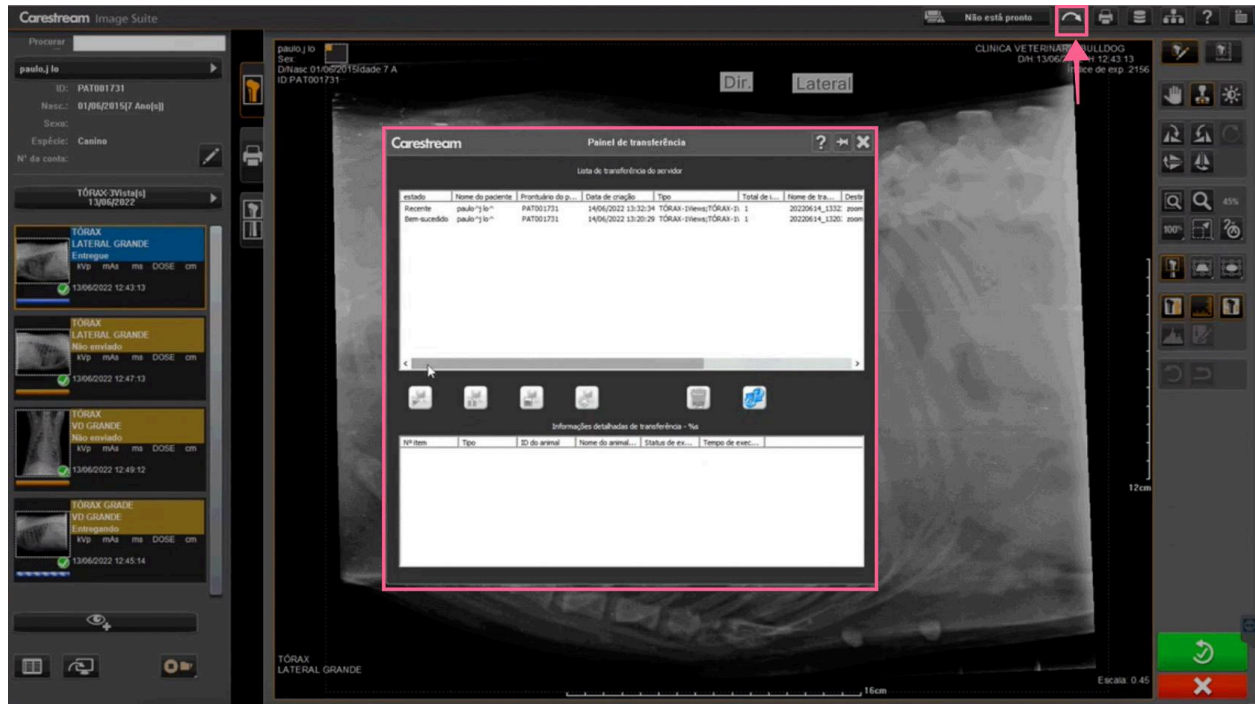

E pronto!

Agora é só acessar o App de Telerradiologia da UniRadio e criar a sua primeira requisição de exame, clicando em “Novo Exame” e escolhendo a opção “Servidor PACS”. ([Ver como enviar um exame](#))

Problemas frequentes:

“Não vejo meus exames no APP.”

Esse problema pode ocorrer por vários motivos:

1. Confira se o seu equipamento digital foi cadastrado no APP de acordo com o “Passo 2”.
2. Confira o “InstitutionName” cadastrado no seu CareStream Image Suite e o “InstitutionName” informado no “Passo 2” são os iguais.
3. Se você não cadastrou seu equipamento corretamente no “Passo 2”, ainda é preciso enviar o exame para o Servidor PACs, para que eles apareçam dentro do App de Telerradiologia da UniRadio.
4. Caso o exame tenha sido realizado há mais de 15 dias, é necessário ajustar o filtro de data na página que lista os exames do Servidor PACS.